

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LE PRÉLÈVEMENT

 Tube sec 5 ml (non fourni)

PRÉLÈVEMENT

1. Prélever 2 ml de sang de façon stérile (respecter les conditions d'asepsie usuelles).



2. Laisser coaguler le sang prélevé sur tube sec laissé au moins 5 heures à température ambiante. (rétraction du caillot)



3. Transvaser le sérum exsudé en surface après rétraction du caillot (faire une centrifugation si possible : meilleure efficacité) dans un autre tube sec afin d'obtenir 0,5 ml minimum de sérum.



0.5 ml



ENVOI

Réalisez votre prélèvement juste avant de l'envoyer.

Comme le sérum sera envoyé à température ambiante pour des raisons pragmatiques, il est important de le faire parvenir rapidement au laboratoire afin d'éviter toute altération.

Dans l'attente de l'envoi, le tube de sérum sera conservé au réfrigérateur.



Vérifier la fermeture du tube, le protéger d'éventuels chocs et le mettre dans un étui porte tube ou équivalent.

Remplir complètement et lisiblement la fiche de renseignements (formulaire N°2) à joindre à l'étui à l'intérieur du colis.

Eviter d'envoyer les prélèvements les Vendredi-Samedi ou veilles de jours fériés afin de ne pas allonger l'acheminement.



Découvrez nos vidéos "Marche à suivre" sur analyses.inoyalys.fr

Une question ? Contactez nous : contact.ecommerce@inoyalys.fr ou au 02.51.85.44.42